

Titel:	Medido inzetten bij de cliënt na tijdelijke beëindiging
Versie:	2

Printdatum: 13-10-2022

Printtijd: 08:34

Algemeen

Publicatiedatum: 26-01-2021

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Overigen

Soort document:	Werkinstructie
-----------------	----------------

Zorgsoort:	Wijkverpleging
------------	----------------

Hyperlinks

Uitgaand

Uitgaande hyperlinks:

Document "Inzet onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) bij cliënten in de thuissituatie"
Document "Baxterrol laden in Medido"

Doel

Voorzien in een verantwoorde werkwijze voor het inzetten van een Medido bij de cliënt na tijdelijke beëindiging.

Doelgroep

Wijkverpleegkundigen
Zorgverlener
Zorgassistent met medicatie module

Definities en omschrijvingen

Medido: een automatische medicijndispenser waarmee Farmaceutische Telezorg door zorginstellingen aan cliënten kan worden geleverd

Beschrijving werkwijze

Input

Cliënten, waarbij de Medido na tijdelijke beëindiging opnieuw wordt ingezet.

Wat	Wie	Hoe
<i>Voorafgaand aan gesprek</i>		
1. Nagaan of de cliënt in aanmerking blijft voor het hulpmiddel Medido.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Indien een indicatie voor het toedienen van medicatie bij de cliënt aanwezig is, kan een Medido bij de cliënt worden ingezet. <ul style="list-style-type: none"> ○ Een Medido wordt bij een aanwezige indicatie voor een verzekerde cliënt vergoed.
<i>Voer het gesprek</i>		
2. Bespreek opnieuw de mogelijkheden voor een Medido met de cliënt en eventueel de mantelzorger van de cliënt.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit samen met de cliënt/mantelzorger tot het opnieuw inzetten van de Medido. • Ga na of de cliënt nog steeds over een baxterrol beschikt. • Leg gegeven adviezen en/ of afspraken vast in het Zorgleefplan.
3. Bespreek het inzetten van de Medido bij de cliënt met de apotheek van deze cliënt.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Vraag een baxterrol bij de apotheek aan, indien deze nog niet aanwezig is.
4. Pas de Zorgplanning van de cliënt aan op inzet Medido.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Plan het wisselen van de baxterrol in de Medido in. • Volg de stappen uit de hulpkaart t.a.v. het opstellen van een Zorgplanning. • Volg de stappen uit de werkinstructie 'Medido opstarten bij cliënt' indien de cliënt begeleiding behoeft bij de Medido.
<i>Herstarten van Medido</i>		
5. Pas de Zorgplanning van de cliënt aan op inzet Medido.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Plan het wisselen van de baxterrol in de Medido in. • Volg de stappen uit de hulpkaart t.a.v. het opstellen van een Zorgplanning.
6. Wijzig het bestaande zorgleefplan.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de stappen uit de hulpkaart t.a.v. het opstellen van een zorgleefplan. • Voeg ten behoeve van de Medido het verpleegprobleem 'Veilig

		<p>medicatiegebruik' toe met de opmerking 'Klaarleggen van medicatie met behulp van Medido', in combinatie met de onderstaande interventies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 'Medicatie volgens voorschrift klaarleggen ○ 'Baxterrol tijdig verwisselen in Medido' ○ 'Begeleiding bij gebruik Medido' ○ 'Opvolging alarmering Medido' <ul style="list-style-type: none"> • Volg de stappen uit de hulpkaart t.a.v. het opstellen van een zorgleefplan. • Onderteken het zorgleefplan/zorgplanning in Hix • Laat de cliënt/vertegenwoordiger de papieren versie ondertekenen. (Mag ook in HIX)
7. Installeer de Medido bij de cliënt.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Plan een afspraak in met de cliënt. • Bepaal opnieuw met de cliënt een geschikte locatie voor de Medido. • Schakel het apparaat in door de oplader aan te sluiten en de gele knop te verschuiven. • Bel naar de Support Desk van Medido om de Medido opnieuw te activeren. • Laad de baxterrol in de Medido. <ul style="list-style-type: none"> ○ Volg de stappen van de werkinstructie Baxterrol laden in Medido • Het is mogelijk om de Medido op slot te doen. Let hierbij op dat dit een vrijheidsbeperkende maatregel kan zijn. <ul style="list-style-type: none"> ○ Volg de stappen uit de werkinstructie 'Inzet onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) bij cliënten in de thuissituatie. • Bestel indien nodig extra plakstrips om verschillende

		baxterrol met elkaar te verbinden via info@medido.com.
8. Vul de zorgkaart in of pas de bestaande zorgkaart aan.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de stappen uit de hulpkaart t.a.v. het invullen van de zorgkaart.
9. Voeg ongeplande afspraken toe, die niet op de zorgplanning staan.	Wijkverpleegkundige*	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de stappen uit de hulpkaart t.a.v. het toevoegen van een ongeplande afspraak.

** De wijkverpleegkundige (HBO-V) is verantwoordelijk voor de genoemde taken. De wijkverpleegkundige (HBO-V) kan zich bij deze taken laten ondersteunen door een zorgverlener.*

Output

- Cliënt is in staat om (deels) zelfstandig de juiste medicatie op het juiste moment in te nemen.

Rapportage

Papieren zorgdossier en thuiszorgdossier in de HIX.

Bijlagen - Gerelateerde documenten

- [Werkinstructie Baxterrol laden in Medido](#)
- [Inzetten onvrijwillige zorg \(Wet zorg en dwang\) bij cliënten in de thuissituatie.](#)